

Aceste instrucțiuni de utilizare conțin informații importante.

Vă rugăm să le citiți cu atenție și să le păstrați pentru o consultare viitoare.

PROGENT

Agent de curățare intensiv

INDICAȚII

Soluție pentru îndepărtarea proteinelor și dezinfectarea lentilelor de contact rigide,

permeabile la gaze.

MOD DE UTILIZARE

1. Curățați meticulos lentilele dvs., cu o soluție de curățare obișnuită.

Pentru curățarea intensivă, așezați lentilele în capacele Progent Vial, în suportii corespunzători pentru lentila din dreapta, respectiv stânga: R = dreapta, L = stânga.

2. Deschideți ambele doze cu atenție, prin menținerea în poziție verticală. Răsuciți vârful încet și cu blândețe, fără a atinge deschizătura sau a strânge doza.

3. Introduceți vârful dozei în interiorul Progent Vial și umpleți încet, mai întâi cu soluția A, apoi cu soluția B, având grijă să nu vărsați niciun pic.

4. Închideți în siguranță capacul Progent Vial și scuturați cu blândețe de câteva ori.

5. Înmuiați lentilele în Progent maxim 30 minute.

6. Îndepărtați capacul Progent Vial și goliți-i conținutul. Clătiți meticulos, cu soluția de clătire obișnuită, lentilele din suportii.

7. Curățați lentilele în întregime cu soluția obișnuită și clătiți-le. Apoi, lentilele pot fi folosite sau păstrate în cutia specială de depozitare.

8. Clătiți bine Progent Vial și capacul său cu soluția de clătire obișnuită și lăsați-le să se usuce.

AVERTIZĂRI

Nu aplicați Progent în ochi, nas și gură. În caz de întrebuintare greșită, clătiți imediat ochii foarte bine cu apă și consultați medicul dvs. oftalmolog.

- Este esențial să clătiți abundent lentilele cu o soluție de clătire obișnuită, după ce le-ați înmuiat în soluția Progent.

- NU LĂSAȚI PRODUSUL LA ÎNDEMÂNA COPIILOR.

PRECAUȚII

- Nu înmuiați lentilele în Progent mai mult de 30 minute. Lentilele se pot decolora. Totuși, acest fapt nu le va afecta calitatea.

Important: nu înghițiți.

- Produsul se poate folosi săptămânal în cazul folosirii zilnice a lentilelor (și la îndepărtarea lentilelor cu purtare extinsă).

- Nu utilizați separat soluțiile Progent A și B.

- Dozele sunt pentru o singură utilizare. Aruncați soluția și dozele după fiecare utilizare.

- Păstrați la temperatura camerei (15-25 °C).

- Evitați contactul cu pielea și împrăștierea soluției Progent pe hainele dvs., deoarece le poate decolora.

- Nu folosiți Progent A și B după data de expirare, imprimată pe doza de unică folosință.

- Nu depozitați în locuri expuse direct la soare.

CONTRAINDICAȚII

- Nu utilizați soluția pentru lentilele moi.

- Nu utilizați dacă aveți alergii la unul dintre ingrediente.

REAȚII ADVERSE

Dacă starea de disconfort sau iritație persistă, îndepărtați lentilele, încetați utilizarea produsului și consultați medicul dvs. oftalmolog.

DEZINFECTAREA LENTILELOR DE CONTACT

Progent acționează ca un dezinfectant pentru microorganisme (bacterii, mușci, viruși, amibe) doar în 5 minute de înmuiere.

AMBALAREA

Progent este disponibil în cutii a câte 5 perechi de doze de Progent A și B,

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

Soluția A: NaClO 20,3 mg, apă purificată până la 5 ml/doză.

Soluția B: KBr 30,75 mg, apă purificată până la 5 ml/doză.

Fabricant: Menicon Pharma S.A.S.

Bd Sébastien Brant – Parc d’Innovation –
F-67400 Illkirch Graffenstaden

Distribuitori: Menicon SAS

104, rue Martre – F- 92583 Clichy Cedex
1156/05-2 2015-07 RO

CE 0483 STERILE A