

0919970-Pompa de san electrica dubla, portabila, hands free, Chicco, 0 luni +

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare și să le păstrați pentru referințe viitoare.

Scopul utilizării și indicații pentru pompa electrică de sân.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT!

- Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe numai dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii, cu excepția cazului în care aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Țineți aparatul și cablul de alimentare departe de copii cu vârsta sub 8 ani. Cablul USB poate cauza strangulare dacă este lăsat la îndemâna copiilor.
- Acest produs este destinat exclusiv utilizării casnice de către un adult și trebuie folosit conform instrucțiunilor de utilizare furnizate. Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare și prin urmare, periculoasă. Artsana nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele cauzate de utilizarea nepotrivită, incorectă sau nerezonabilă a aparatului.
- Aparatul este pentru uz personal și nu trebuie vândut de către cumpărător sau împrumutat altor utilizatori.
- Acest aparat și componentele sale nu trebuie expuse la lumina directă a soarelui, ploaie sau alte intemperii.
- Vă rugăm să vă asigurați că micuții nu se joacă cu dispozitivul sau cu oricare dintre componente.
- Așezați întotdeauna aparatul numai pe o suprafață plană, stabilă, departe de pătuțuri și leagăne.
- Înainte de a conecta adaptorul de rețea la priza de curent, asigurați-vă că informațiile de pe plăcuța de date și adaptorul de rețea sunt compatibile cu rețeaua dumneavoastră electrică și cu priza corespunzătoare.
- Utilizați doar adaptoare de rețea certificate. Se pot folosi adaptoare AC – DC 5.0V, 2000mA pentru a încărca dispozitivul.
- Conectați cablul de încărcare la un adaptor de rețea și la o priză ușor accesibilă doar de către un adult.
- Când deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare, scoateți mai întâi adaptorul din priză sau cablul de încărcare din priza USB și abia apoi deconectați cablul USB de la unitatea motorului. Nu trageți de cablul USB sau de dispozitivul propriu-zis (dacă este conectat) pentru a deconecta adaptorul de rețea din priză.
- Nu curățați și nu igienizați pompa de sân în timpul funcționării, când este alimentată cu baterii sau când este conectată la rețea. Operațiunile de curățare și igienizare trebuie realizate conform acestor instrucțiuni de utilizare.
- Pentru a evita proliferarea bacteriilor, se recomandă hrănirea imediată a bebelușului după colectarea laptelui sau depozitarea imediată a acestuia într-un mod adecvat.
- Curățați și igienizați cupa, recipientul pentru lapte, supapa și conectorul înainte de fiecare utilizare.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă membrana nu este deteriorată: aceasta nu trebuie să fie ruptă sau tăiată. Dacă este ruptă sau tăiată, nu folosiți aparatul.
- Orice curățare și igienizare care trebuie efectuată de către utilizator nu trebuie să fie realizată de copii și/sau de persoane cu capacități mentale reduse sau fără experiență ori cunoștințele necesare.
- Nu udați dispozitivul și nu îl introduceți în apă sau alte lichide din niciun motiv. Dacă un lichid a pătruns în dispozitiv, contactați numărul nostru gratuit (800-188-898) sau personal calificat înainte de o nouă utilizare.
- Dacă dispozitivul prezintă semne de deteriorare, nu îl folosiți și contactați numărul nostru gratuit (800-188-898) sau personal tehnic calificat înainte de o nouă utilizare.
- Nu încercați să deschideți sau să reparați dispozitivul dacă este defect sau deteriorat. În caz de defecțiuni sau daune, vă rugăm să contactați numărul nostru gratuit (800-188-898). Orice reparație/intervenție efectuată direct de către utilizator poate duce la riscuri grave pentru siguranța utilizatorului sau a altor persoane, poate deteriora ireversibil dispozitivul și duce la anularea imediată a garanției.
- Dacă ambalajul pare deteriorat, verificați starea tuturor componentelor și pieselor aparatului.
- Înainte de utilizare, îndepărtați și aruncați toate pungile din plastic și materialele de ambalare și păstrați-le departe de copii; acestea pot reprezenta un pericol.
- După îndepărtarea oricăror materiale de ambalare, asigurați-vă că dispozitivul nu este deteriorat și urmați instrucțiunile din secțiunea „CURĂȚARE”. În caz de dubii, nu utilizați aparatul și contactați doar personal tehnic calificat, la punctul de vânzare sau la numărul nostru gratuit (800-188-898).
- Asigurați-vă că dispozitivul este plasat pe suprafețe plane și stabile, pentru a preveni răsturnarea sau căderea acestuia, atât

în timpul utilizării cât și înainte de a fi golit.

- Nu așezați aparatul pe suprafețe delicate sau pe suprafețe sensibile la umiditate și căldură.
- Nu utilizați aparatul în timp ce faceți baie sau duș, în locuri umede, în apropierea căzilor de baie, chiuvetelor, lavoarelor sau în orice altă situație în care există lichide ce pot intra în contact cu aparatul.
- Atunci când folosiți orice aparat electric, este necesar să respectați câteva reguli de siguranță de bază:
 - Nu atingeți niciodată aparatul cu mâinile ude sau umede.
 - Țineți dispozitivul și cablul de alimentare departe de sursele de căldură.
 - Nu atingeți dispozitivul și cablul de alimentare dacă acestea au căzut accidental în apă sau au intrat în contact cu apă sau lapte.
 - În caz de defecțiune și/sau funcționare necorespunzătoare a dispozitivului, opriți-l imediat, scoateți adaptorul din priza de rețea, nu încercați să interveniți asupra lui, nu îl utilizați și contactați un personal calificat sau numărul gratuit (800-188-898).
- Aparatul trebuie curățat și uscat complet la finalul fiecărui ciclu de utilizare.
- Dacă dispozitivul nu va fi folosit pentru o perioadă îndelungată, acesta trebuie curățat temeinic înainte de a fi depozitat într-un loc curat și uscat, ferit de lumină și surse de căldură, și în conformitate cu instrucțiunile privind depozitarea și transportul.
- Pentru a evita orice risc de incendiu sau electrocutare, asigurați-vă că cablul USB nu trece pe sub covoare sau în apropierea radiatoarelor, sobelor sau altor surse de căldură.
- Utilizați aparatul la o temperatură cuprinsă între +5°C și +40°C. Utilizarea în afara acestor limite de temperatură, în special peste limita superioară, poate duce la supraîncălzirea aparatului, cu posibile daune și/sau risc de arsuri sau expunere la părți sub tensiune pentru utilizator.
- Aparatul nu trebuie utilizat continuu pentru mai mult de 30 de minute. După utilizare, aparatul trebuie oprit timp de cel puțin 30 de minute. Dacă aparatul este folosit peste timpul maxim de funcționare permis, chiar dacă dispune de un sistem automat de oprire după 30 de minute, acest lucru poate duce la supraîncălzire, cu posibile daune și/sau risc de arsuri sau expunere la părți sub tensiune pentru utilizator.
- Caracteristicile produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Dacă aveți nelămuriri legate de interpretarea conținutului acestui manual de instrucțiuni, contactați distribuitorul dumneavoastră sau apelați numărul nostru gratuit (800-188-898).

AVERTISMENTE PRIVIND BATERIA LITIU

- Acest produs utilizează o baterie litiu-ion ca sursă de alimentare.

Dacă nu este folosit pentru o perioadă lungă, păstrați dispozitivul într-un loc răcoros și uscat și încărcați bateria la fiecare 3 luni.

	Cod de referință din catalogul de produse		Curent continuu
	Avertisment		Conform cu Directiva Europeană 2012/19/UE
	Numai pentru uz în interior		Mod așteptare (presiune)
	Aparatul respectă cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile		Numar serie

POMPA DE SÂN ȘI ALĂPTAREA

POMPA DE SÂN ȘI ALĂPTAREA

Alăptarea este o etapă foarte importantă în viața unui bebeluș și a unei mame. Pentru bebeluși, atașarea la sân și suptul înseamnă nu doar satisfacerea unei nevoi fiziologice primare, ci și, mai ales, un moment prețios în relația cu mama lor, plin de emoții și senzații tactile, auditive, gustative și olfactive. Satisfacerea acestei nevoi oferă o senzație de liniște și stare de bine atât pentru mamă, cât și pentru copilul ei. Laptele matern conține toți nutrienții necesari pentru a răspunde nevoilor

nutriționale și psihologice ale sugarilor, cel puțin în primele 6 luni de viață. Pompa de sân electrică portabilă Chicco ajută la prelungirea perioadei de alăptare, în cazul unui exces de lapte sau când nu puteți fi mereu lângă copilul dumneavoastră. În astfel de cazuri, puteți extrage laptele, îl puteți depozita și îl puteți oferi copilului atunci când este necesar.

LISTA COMPONENTELOR

1. Unitate motor (2 bucăți)
2. Recipient pentru lapte (2 bucăți)
3. Membrană (2 bucăți)
4. Conector (2 bucăți)
5. Supapă (2 bucăți)
6. Cupă (2 bucăți)
7. Orificiu de golire
8. Adaptoare pentru mamelon (21 mm și 24 mm) (2 bucăți din fiecare tip)
9. Buton Pornire/Oprire
10. Buton de reducere a nivelului „-“
11. Buton de creștere a nivelului „+”
12. Buton de selectare a modului
13. Indicator nivel baterie
14. Indicator mod stimulare: 10 niveluri
15. Indicator mod extragere standard: 10 niveluri
16. Indicator mod extragere intensă: 10 niveluri
17. Port USB
18. Capacul din silicon
19. Cablu USB (2 bucăți)
20. Săculeț din material textil (2 bucăți)

ASAMBLARE

- Înainte de a utiliza pompa de sân pentru prima dată, spălați temeinic toate componentele, cu excepția unității motor (1) și a cablului USB (18), conform instrucțiunilor din secțiunea „CURĂȚARE”.
- Încărcați unitatea motor (1) folosind cablul USB furnizat (18) prin conectarea acestuia la o priză de curent cu ajutorul unui adaptor compatibil de 5V 2A. Deschideți capacul din silicon (17) de pe spatele unității motor, introduceți cablul USB (18) în portul USB (16), conectați-l la un adaptor compatibil de 5V 2A și apoi introduceți adaptorul în priză.
- În timpul încărcării, indicatorul de nivel al bateriei (13) clipește alb și rămâne aprins constant alb atunci când încărcarea este completă.

ATENȚIE: Pompa de sân nu poate fi utilizată în timpul încărcării.

ATENȚIE: Încărcați pompa de sân doar cu adaptoare de rețea compatibile de 5V 2A, altfel pompa se poate deteriora iremediabil.

ATENȚIE: În caz de neutilizare prelungită, încărcați bateria cel puțin o dată la fiecare 3 luni.

- Apoi asamblați pompa de sân după cum urmează:
- Introduceți complet supapa (5) pe canalul circular aflat la baza conectorului (4), astfel încât tăietura marginilor să fie paralelă cu cupa (Pasul 1)
- Apăsăți pe marginea exterioară pentru a evita deteriorarea supapei și asigurați-vă că cele două margini de închidere ale supapei montate sunt unite. Dacă nu sunt, re poziționați supapa, asigurându-vă că cele două margini sunt aliniate corect.
- Montați membrana din silicon (3) pe conector (4) și asigurați-vă că marginea exterioară acoperă complet marginea locașului conectorului (Pasul 2)
- Introduceți conectorul în recipientul de lapte, fixându-l ferm în locașul destinat membranei aflat în partea superioară a recipientului. (Pasul 3)
- Închideți recipientul pentru lapte cu cupa rigidă prin atașarea fermă la conector. (Pasul 4). Asigurați-vă că cele două părți sunt bine fixate **închis pe întreaga periferie**.
- Atașați unitatea motor la recipientul de lapte și la ansamblul de cupă (Pasul 5).
- Pe spatele unității motor există un L marcat pe un motor și un R pe celălalt pentru a identifica stânga și dreapta, respectiv. Cele două motoare sunt interschimbabile, dar aceste mici referințe permit utilizatorului să identifice care motor a fost utilizat pe un sân și care pe celălalt, deoarece motorul stochează cele mai recente setări folosite înainte de a fi oprit.

UTILIZAREA POMPEI DE SÂN


• Înainte de fiecare utilizare, dezinfecțați toate componentele, cu excepția unității motor (1) și a cablului USB (19), utilizând o metodă de dezinfectare la rece cu lichide de sterilizare (urmând instrucțiunile producătorului), sau o dezinfectare la cald (cu aburi) utilizând dispozitive specifice, sau prin fierberea componentelor (5 minute), lăsând componentele dezinfectate la cald să se răcească complet înainte de utilizare.

ATENȚIE: Nu sterilizați în cuptoare cu microunde, deoarece componentele pot fi deteriorate iremediabil.

• Înainte de fiecare utilizare, este recomandat să verificați starea de încărcare a bateriei apăsând o dată butonul de pornire/oprire cu unitatea motor oprită și verificând lămpile indicatoare 13, 14, 15, 16:

- dacă toate indicatorii se aprind, bateria este complet încărcată,
- dacă se aprind indicatorii 13, 14 și 15, bateria este aproape complet încărcată,
- dacă se aprind indicatorii 13 și 14, bateria este aproximativ 50% încărcată,
- dacă se aprinde indicatorul 13, bateria este la minim și se recomandă încărcarea înainte de utilizare pentru a preveni ca pompa de sân să se oprească în timpul utilizării,
- dacă indicatorul 13 clipește rapid, bateria este scăzută și trebuie încărcată neapărat înainte de utilizare, așa cum este descris la „PREPARARE”.
 - Spălați-vă pe mâini și asamblați pompa de sân conform paragrafului de PREPARARE.
 - Așezați pompa de sân pe sân și asigurați-vă că nu există aer care să treacă între sân și cupă, pentru ca produsul să funcționeze corect. Susțineți sânul cu mâna de dedesubt și țineți pompa de sân pe sân. Este esențial ca mamelonul să fie perfect aliniat cu orificiul din cupă (Pasul 6).
 - Dacă cupa standard de 27 mm este prea mare pentru mamelonul dumneavoastră, utilizați o flanșă din silicon de 24 mm sau 21 mm (7) din cele incluse în pachet, având grijă să o fixați complet în jurul cupei după ce ați închis recipientul pentru lapte cu cupa (Pasul 7).
 - Cum poate utilizatorul să identifice flanșa cea mai potrivită?

Mamelonul trebuie să se poată mișca liber în timpul utilizării. Dacă apare frecare între mamelon și cupă/flanșă, atunci aceasta este prea mică. Dacă și areola este aspirată, atunci este prea mare.

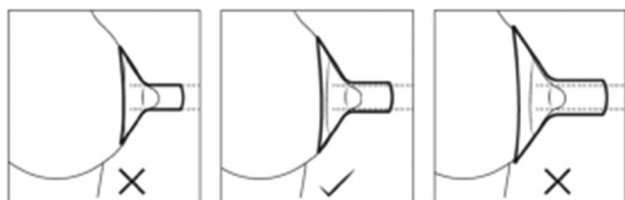

• După ce pompa de sân este poziționată pe sân, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/oprire (8) pentru a porni pompa de sân.

• Indicatorii 13, 14, 15, 16 se vor aprinde câteva secunde pentru a indica starea de încărcare a bateriei, așa cum a fost menționat mai sus.

Notă: atunci când este pornită, pompa de sân începe întotdeauna în modul de stimulare pentru a facilita extracția laptelui, utilizând setările din fabrică (nivelul 1). După ce este afișată starea de încărcare a bateriei prin indicatorii 13, 14, 15, 16, doar indicatorul corespunzător modului de stimulare (13) se va aprinde.

• După aproximativ 2 minute de stimulare, aparatul trece automat în modul de extracție la nivelul 1 (setări din fabrică). Indicatorul pentru modul de extracție standard (14) se aprinde.

• Puteți opri etapa de stimulare și trece la etapa de extracție standard apăsând o dată butonul de selecție a modului (12). Pentru a trece în modul de extracție intensă (15), apăsați de două ori butonul de selecție a modului (12).

Prin apăsarea repetată a butonului de selecție a modului (12), se pot selecta 3 moduri diferite: 1- Stimulare (13) 2- Extracție standard (14) 3- Extracție intensă (15) • Intensitatea stimulării și extracției poate fi ajustată folosind butoanele „+” (11) și „-” (10). • Dacă nivelul de extracție/stimulare ales provoacă disconfort sau durere, reduceți-l la un nivel potrivit apăsând butonul „-” (10). Notă: Pentru a evita orice pericol derivat din vărsarea lichidului (lapte), nu umpleți containerul de lapte dincolo de nivelul cel mai înalt indicat pe scala gradată (150 ml). • Pompa de sân poate fi pusă pe pauză prin apăsarea butonului de pornire/oprire (9) o dată, apăsarea pentru a doua oară va relua operațiunea acolo unde a fost întreruptă. • Pentru a opri pompa de sân, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/oprire (9), altfel pompa de sân se va opri automat după 30 de minute. Când bateria este aproape descărcată, indicatorul 13 va începe să clipească și produsul se va opri scurt timp după aceea. Bateria trebuie încărcată înainte de a relua utilizarea pompei de sân, așa cum este indicat la „PREGĂTIRE”. • După

utilizare, cu pompa de sân oprită, îndepărtați-o de pe sân, ținând-o într-o poziție verticală. • După ce ați plasat baza containerului pe o suprafață plată, îndepărtați unitatea motor de la containerul de lapte (Pasul 8), ținând-o verticală pentru a evita vărsarea laptelui. • **AVERTISMENT:** containerul de lapte nu este destinat stocării laptelui. • Goliți containerul turnând laptele extras prin gaura de golire (7) direct într-o sticlă de hrană/sac de lapte/container (Pasul 9).

CURĂȚARE • Înainte de a efectua orice operațiune de curățare, verificați că produsul nu este conectat la rețea și că este oprit.

• Separă toate componentele de la pompa de sân. Notă: îndepărtați valva (5) printr-o tragere ușoară. • **AVERTISMENT:** Asigurați-vă că valva este întotdeauna îndepărtată într-un mod delicat; nu utilizați niciun instrument pentru a o curăța, deoarece aceasta poate fi deteriorată, făcând pompa de sân imposibil de utilizat. • Spălați temeinic toate componentele, cu excepția unității motor (1) și a cablului USB (19), cu apă caldă și detergent de vase, clătiți bine și uscați temeinic cu o cârpă moale și curată. • Nu utilizați produse abrazive pentru a curăța pompa de sân și componentele acesteia. • Curățați unitatea motor cu o cârpă moale, curată și uscată. Atenție! Nu udați aparatul și nu-l puneți în apă sau alte lichide. • Următoarele pot fi spălate în mașina de spălat vase folosind un ciclu delicat: containerul de lapte, conectorul, valva, membrana, cupa și flanșele. Acest tip de spălare mai agresiv poate cauza decolorarea materialului sau îngălbenirea acestuia și degradarea în timp. • Curățați cu grijă pereții găurii de golire cu o perie de sticlă. • După spălare, păstrați întotdeauna produsul într-un loc curat și uscat. Dacă este necesar, spălați manual sacul de țesătură în apă caldă, urmând instrucțiunile de pe etichetă care conțin simbolurile de spălare: Spălare manuală

Nu se folosește clor

Nu se usucă la mașina de uscat

Se usucă plat

Nu se călca

Nu se curăță chimic

EROARE	CAUZA	SOLUTIONARE
Pompa de san nu absoarbe sau absoarbe foarte putin	Nu este valva montata sau este montata gresit	Montati valva corect
	Cua nu se potrivește cu sanul	Potriviti corect pe san astfel incat mamelonul sa fie bine centrat. Incercati sa folositi flansele suplimentare si daca au fost utilizate, extrageți-le si incercati din nou pozitionand corect poma pe san.
	Nivelul de succiune nu este cirect setat	Modificati nivelul de succiune pana cand obtineti succiunea optima atingand butoanele<+ si ->
	Nivelul de incarcare a bateriei este scazut sau este descarcata	Incarcati bateia cu incarcatorul.
	Membrana nu este montata sau este montata gresit	Montati membrana corect in spatiul potrivit
	Container pentru lapte sau cupa nu se inchid correct si/sau lipseste conectorul	Verificati sa nu lipseasca componente din recipient si sa fie correct inchis cu cupa.
	Nivel succiune scazut	Cresteti nivelul succiunii pana cand obtineti nivelul dorit presand butonul<+>

Extragerea laptelui este dureroasa	Nivel suptiune prea crescut	Scadeti nivelul suptiunii pana cand obtineti nivelul dorit presand butonul<->
	Cupa din silicon nu se potriveste bine pe san	Potriviti corect pe san astfel incat mamelonul sa fie bine centrat. Incercati sa folositi flansele suplimentare si daca au fost utilizate, extrageti-le si incercati din nou pozitionand corect poma pe san.
Pompa de san nu porneste	Nivelul de incarcare a bateriei este scazut sau este descarcata	Verificati nivelul de incarcare in momentul in care doriti sa utilizati pompa
	Conexiune defectuoasa	Faceti toate conexiunile correct.
	Nivelul de incarcare a bateriei este scazut sau este descarcata	Daca este cazul incarcati-o.

Specificatii tehnice

Nivel vacuum maxim in mid <extractie>: **-0.35 ± 0.03 bar**

Modalitate functionare: intermittent 30 min. activ-30 min. repaos.

Greutate/produs: 206 gr cu bateriile incluse.

Dimensiune: 95X145X65 mm

Functioneaza cu baterii reincarcabile LI-ION de **3.7V 1200mAh/power supply 5V DC 2A**

Declaratie Conformitate pentru pompa de san Chicco **REF 00009199700000 Mod. N0269** este conform cerintelor esentiale ale Directivei **2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility), 2014/35/EU (Low Voltage) and 2011/65/EU (RoHS)**. O copie a declaratiei de conformitate poate fi solicitata producatorului
Artsana S.p.A via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (Como) Italy.

The Electric Breast Pump REF 00009199700000 Mod. N0269 complies with Regulation (EU) 2023/1542

Si CU DIRECTIVA 2012/19/UE

Simbolul **coşului de gunoi tăiat** de pe aparat indică faptul că acest produs, la sfârşitul duratei sale de viaţă, trebuie eliminat separat de deşeurile menajere. Acesta trebuie dus la un centru de colectare selectivă pentru echipamente electrice şi electronice sau predat comerciantului la achiziţionarea unui echipament echivalent.

Utilizatorul este responsabil de predarea dispozitivului, la sfârşitul duratei sale de viaţă, către centrele de colectare adecvate. O colectare selectivă corectă, care permite reciclarea, tratarea şi eliminarea ecologică a produsului, ajută la prevenirea impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii şi favorizează reutilizarea materialelor componente.

Pentru informaţii detaliate despre sistemele de colectare disponibile, contactaţi serviciul local de gestionare a deşeurilor sau magazinul de unde a fost achiziţionat produsul.

GARANȚIE

Produsul este garantat împotriva oricăror defecte de conformitate în condiții de utilizare normală, așa cum este specificat în instrucțiuni. Garanția nu se va aplica, așadar, în cazul în care daunele sunt cauzate de utilizarea incorectă, uzură sau evenimente accidentale. Pentru durata garanției în cazul defectelor de conformitate, vă rugăm să consultați dispozițiile specifice ale legislației naționale aplicabile din țara de achiziție, după caz.

Producator: Artsana SpA-Italia: Via Saldarini Catelli 1, 22070, Grandate, tel: 0039-031382111. Importator si distribuitor : Paralela45 Kids SRL, Calea Grivitei 202B, sector 1, Bucuresti, Tel/fax: 021-2310626

