

0919950-POMPA ELECTRICA PORTABILA CHICCO NATURALLY ME

Citiți cu atenție înainte de utilizare și păstrați pentru referințe ulterioare.

Utilizarea prevăzută și indicațiile pompei electrice de sân

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ ATENȚIE!

- Acest aparat este destinat doar uzului acasa, pentru adulți și trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare. Orice altă utilizare trebuie considerată necorespunzătoare și prin urmare, periculoasă. Artsana nu poate fi făcută responsabilă pentru eventualele daune rezultate din utilizări incorecte, eronate și nerezonabile.
- Dispozitivul este destinat uzului personal și nu poate fi transferat de către cumpărător sau încredințat unor terți utilizatori.
- Acest dispozitiv și componentele sale nu trebuie expuse la lumina directă a soarelui, ploaie și alți agenți atmosferici. Adaptorul AC este destinat numai utilizării în interior. Prin urmare, nu trebuie expus la soare, ploaie și alți agenți atmosferici.
- Dacă dispozitivul este utilizat în aer liber, trebuie utilizat numai și exclusiv alimentat de bateriile interne și nu trebuie expus la soare, ploaie sau alți agenți atmosferici: Acest avertisment ar putea expune utilizatorul la riscul de electrocutare.
- Acest dispozitiv nu este o jucărie. Nu trebuie folosit de copii sau de persoane cu capacități mentale reduse sau fără experiența sau cunoștințele necesare. Produsul nu trebuie utilizat de persoane cu abilități fizice sau senzoriale reduse decât dacă sunt sub supravegherea unui adult și au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a dispozitivului și dacă înțeleg riscurile aferente.
- Aparatul trebuie alimentat cu tensiune joasă.
- Nu lăsați dispozitivul, componentele sale și cablul USB la îndemâna copiilor. Cablul USB și tubul de conectare de la corpul motorului la trusa de aspirație pot prezenta un risc de strangulare dacă sunt lăsate la îndemâna copiilor. Dispozitivul conține și piese mici care, dacă sunt înghițite, ar putea provoca sufocarea copilului.
- Asigurați-vă că micuții nu se joacă cu dispozitivul, componentele acestuia și cablul USB.
- Așezați întotdeauna aparatul numai pe suprafețe plane și stabile, departe de leagăne și pătuțuri.
- Nu efectuați operațiuni de curățare sau dezinfecție în timpul funcționării sau reîncărcării. Operațiunile de curățare și sterilizare trebuie efectuate în conformitate cu aceste instrucțiuni de utilizare.
- Pentru a preveni orice proliferare bacteriană se recomandă fie să se administreze laptele imediat după ce a fost extras, fie să îl depoziteze în cel mai potrivit mod.
- Curățați și igienizați protecția din silicon (3), cupa (4) și supapa (5) înainte de fiecare utilizare. De asemenea, curățați și sterilizați biberonul (6) și accesoriile acestuia (7) - (8), în conformitate cu instrucțiunile date în instrucțiunile de utilizare corespunzătoare.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă membrana este în stare bună: nu trebuie niciodată zdrobită sau tăiată. În cazul unei lacerări sau tăieturi, nu utilizați produsul.
- Curățarea și sterilizarea, care este responsabilitatea utilizatorului, nu trebuie efectuate de copii și/sau de persoane cu capacități mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe adecvate.
- Nu scufundați sau înmuiați niciodată dispozitivul sau cablul USB în apă sau în orice alt lichid și nu le puneți niciodată sub jet de apă. Dacă dispozitivul sau cablul USB intră în contact cu lichid, sunați la numărul gratuit (800-188-898) sau contactați personalul tehnic calificat înainte de a utiliza din nou produsul.
- Dacă dispozitivul sau cablul USB prezintă semne de deteriorare, produsul nu trebuie să mai fie utilizat. Dacă dispozitivul sau cablul USB prezintă semne de deteriorare, sunați la numărul gratuit (800-188-898) sau contactați personalul de service calificat înainte de a utiliza din nou produsul.
- Baterie care nu poate fi înlocuită.
- Nu încercați niciodată să deschideți sau să reparați dispozitivul dacă este defect sau deteriorat. În caz de avarie sau deteriorare a dispozitivului în general sau a caroseriei motorului, sunați la vânzător. Orice reparații/intervenții efectuate de utilizator ar putea pune în pericol grav siguranța terților sau propria lor siguranță și poate deteriora iremediabil dispozitivul. În plus, acestea duc la decăderea imediată a garanției.
- Dacă ambalajul nu este în stare bună, verificați starea tuturor părților produsului. Dacă cablul USB și corpul motorului sunt în stare bună, ca măsură de precauție, spălați toate componentele kit-ului conform instrucțiunilor din paragraful „CURATARE”.
- Înainte de utilizare, îndepărtați și aruncați orice pungă din plastic și toate elementele care se află în ambalajul produsului și nu-l lasați la îndemâna copiilor; ar putea reprezenta o sursă de pericol.
- După ce ați scos dispozitivul din ambalaj, verificați dacă este în stare bună și că nu există deteriorări vizibile. Dacă aveți dubii, nu utilizați dispozitivul și contactați numai tehnicieni calificați, la punctul de vânzare
- În timpul utilizării și depozitării, asigurați-vă că dispozitivul este așezat pe o suprafață plană și stabilă pentru a preveni răsturnarea sau căderea acestuia.
- Nu așezați dispozitivul pe suprafețe delicate sau sensibile la umiditate și căldură.

- Nu folosiți aparatul în timp ce faceți o baie sau un duș, într-un mediu umed, lângă o cadă, o chiuvetă, sau în prezența lichidelor care ar putea intra în contact cu aparatul.
- Utilizarea oricărui dispozitiv electric presupune respectarea anumitor reguli fundamentale:
 - Nu atingeți niciodată dispozitivul cu mâinile ude sau umede.
 - Țineți aparatul departe de sursele de căldură.
 - În cazul unei defecțiuni și/sau defecțiuni a dispozitivului și/sau a cablului USB, opriți imediat dispozitivul, nu încercați să-l reparați sau să utilizați produsul, ci contactați personalul calificat
- Dispozitivul trebuie curățat și uscat temeinic la sfârșitul fiecărui ciclu de funcționare.
- Dacă aparatul nu este folosit o perioadă îndelungată, trebuie curatat cu atenție, scoateți bateriile (dacă sunt introduse) și depozitați-le într-un loc curat și uscat ferit de lumina și surse de căldură și în conformitate cu reglementările, instrucțiuni de transport.
- Dacă decideți să nu mai folosiți dispozitivul, nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere, depuneți-l separat ca echipament electric/electronic (DEEE) în conformitate cu Directiva 2012/19/UE sau cu legile în vigoare în țările în care acesta este vândut.
- Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, nu permiteți cablului USB să treacă pe sub covor sau lângă un radiator, aragaz sau alt dispozitiv de încălzire.
- Utilizați dispozitivul într-un interval de temperatură cuprins între + 5 ° C și + 40 ° C. Utilizarea în afara acestor limite și în special, limita superioară ar putea cauza supraîncălzirea dispozitivului cu deteriorarea ulterioară a acestuia și/sau riscul de arsuri sau accesul la părțile sub tensiune de către utilizator. • Dispozitivul a fost proiectat să funcționeze numai cu componente furnizate în ambalajul original și cu biberon - capacitate de 150 ml. Utilizarea altor componente sau biberone cu o capacitate mai mare poate să nu garanteze performanța declarată. • Dispozitivul nu trebuie utilizat continuu mai mult de 30 de minute. La sfârșitul utilizării, trebuie respectată o perioadă de odihnă de 30 de minute. • Specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă. • Dacă aveți îndoieli cu privire la interpretarea conținutului acestui manual de instrucțiuni, contactați dealerul dumneavoastră. **RECOMANDĂRI PRIVIND BATERIA CU LITIU ȘI ÎNCĂRCAREA PRODUSULUI** • Se recomandă încărcarea produsului peste noapte la prima utilizare. • Urmați instrucțiunile din manual pentru a încărca corect bateria cu litiu. • Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor în timpul operațiunilor de reîncărcare. • Bateria cu litiu nu poate fi înlocuită de către utilizator și, în orice caz, este interzisă utilizarea unei alte baterii cu litiu decât cea furnizată. • Încărcarea trebuie efectuată numai printr-un cablu USB conectat direct la computer. • Nu utilizați produsul în alt mod decât cel recomandat. • Nu lăsați bateria cu litiu încărcată atunci când nu este utilizată. • ARTSANA nu poate fi făcută responsabilă pentru orice daune rezultate din orice utilizare necorespunzătoare, eronată sau nerezonabilă. • Reciclați urmând instrucțiunile din următorul manual.

 cod de referință din catalog;  atenție;  destinat utilizării în casa;  pornit/oprit;  curent

alternativ;  curent continuu;  conform cu Directiva 2012/19/ UE

Pompa electrică pentru sân Chicco ajută la prelungirea alăptării, în caz de exces de lapte sau atunci când trebuie să fii departe de bebeluș. În aceste cazuri, laptele poate fi extras pentru a-l depozita și a-l oferi bebelușului atunci când este nevoie.

Pentru a asigura flexibilitate și confort maxim, pompa de sân electrică funcționează atât în modul baterie (bateria cu litiu inclusă) cât și în modul de reîncărcare a bateriei, printr-un cablu USB conectat direct la PC.

LISTA COMPONENTELOR

- 1- Membrana
- 2- capac membrana
- 3- Husa din silicon moale
- 4- Corpul cupei
- 5- Supapă
- 6- Biberon NaturalFeeling
- Suzeta de 7-0m cu capac și inel
- 8- Capac ermetic
- 9- Conector cablu USB
- 10- Conector USB al cablului USB
- 11- Intrare tub din silicon
- 12- Intrare cablu USB
- 13- Unitate motor
- 14 -Indicator LED
- 15- Buton pornire/oprire
- 16- Buton de stimulare / tragere

17- Buton de creștere a nivelului de stimulare / tragere

18- Buton de scădere a nivelului de stimulare / tragere

19- Tub de silicon

PREGĂTIREA

• Înainte de a utiliza pompa de sân pentru prima dată, spălați cu atenție toate componentele * așa cum este indicat în paragraful „CURATARE”.

• Apoi, asamblați pompa de sân după cum urmează:

• Introduceți complet supapa (5) pe conducta circulară situată în interiorul bazei cupei (4). (Fig. 1)

Notă: de preferință montați supapa cu urechea poziționată spre interiorul cupei.

• Împingeți marginea exterioară pentru a evita deteriorarea supapei și asigurați-vă că cele două capete ale supapei asamblate sunt unite. În caz contrar, re poziționați supapa, având grijă să obțineți alinierea corectă a picioarelor.

• Este posibil să se monteze protecția din silicon (3) pe pompa(4) pentru un confort mai bun. Introduceți complet protectorul din silicon în interiorul pompei, prinzând marginea protectorului din silicon pe perimetrul exterior al pompei (Fig. 2). Strângeți tampoanele pentru a elibera orice aer care ar fi rămas în interior.

• Asamblați membrana siliconică (1) cu capacul membranei (2) și introduceți membrana și capacul membranei (preasamblate) pe corpul cupei(4) (Fig.3)

• Înșurubați biberonul NaturalFeeling (6) pe baza filetată a corpului pompei (4) (Fig.4).

• Așezați produsul asamblat numai pe o suprafață plană și stabilă.

• Pentru a utiliza sau încărca pompa de sân cu cablul său USB, conectați conectorul cablului USB (9) la intrarea cablului USB de pe corpul motorului (12), apoi conectați conectorul USB al cablului USB (10).) la computer, așa cum se arată

în acest anunț.

• Conectați tubul de silicon (19) la capacul membranei (2) (Fig.6).

• Introduceți capătul tubului de silicon (19) în intrarea corespunzătoare de pe corpul motorului (11) (Fig.7).

* Cu excepția corpului motorului (12) (Fig. 5), a cablului USB (9,10) și a tubului din silicon (19).

UTILIZAREA POMPEI DE SÂN

• Înainte de fiecare utilizare se sterilizează toate componentele * folosind lichide sterilizante reci (conform instrucțiunilor producătorului), sau fierbinti (abur) folosind aparate special concepute, sau prin fierbere (5 minute), lasând complet racite toate componentele fierbinti igienizate.

• Spălați-vă pe mâini și asamblați pompa de sân așa cum este indicat în paragraful „PREGĂTIRE”.

• Curățați sânul corespunzător cu apă sau cu șervețele igienizante Chicco pentru igiena sânilor

• Așezați-vă într-o poziție confortabilă și relaxată.

Notă: atunci când utilizați pompa de sân, pentru a asigura funcționarea corectă a produsului, aveți grijă să nu acoperiți orificiul din partea stângă a corpului (4) cu mâna.

Notă: la pornire, pompa de sân pornește întotdeauna în modul stimulare pentru a facilita pomparea laptelui, cu setările din fabrică (nivel 1). Indicatorul LED (14) este albastru continuu.

Notă: pentru a evita orice pericol rezultat din revărsarea lichidelor (lapte), se recomandă să nu umpleți niciodată biberonul peste maximumul indicat pe scala sa gradată.

• Asigurați-vă că soneria este bine fixată de sân, asigurându-vă că mamelonul este bine centrat. Utilizarea pompei de san este posibila cu sau fara protectia din silicon moale (3); Vă recomandăm să încercați ambele configurații și să o alegeți pe cea mai potrivită și confortabilă pentru dvs.

• În modul baterie, porniți pompa de sân apăsând butonul de pornire/oprire (15) de pe corpul motorului (13), indicatorul LED (14) se aprinde în albastru continuu.

• După 3 minute de stimulare, aparatul trece automat în faza de extragere (nivel 1 - setare din fabrică), indicatorul luminos se aprinde apoi în alb.

• Este posibil să întrerupeți în orice moment faza de stimulare și să treceți la faza de extragere și invers, prin apăsarea scurtă a butonului de stimulare / tragere (16).

• Dacă este necesar, repetați stimularea apăsând din nou butonul de stimulare/extragere (16). Pentru a trece apoi la faza de tragere, apăsați butonul de stimulare/tragere (16).

• Prin utilizarea tastelor „+” (17) și „-” (18) de pe tastatură, este posibilă reglarea stimulării/extragerii în funcție de nivelul de tracțiune resimțit pe sân și/sau în funcție de extragere a laptelui. La fiecare trecere de nivel, LED-ul (14) clipește o dată în albastru sau alb, în funcție de modul selectat. Este indicat să reglați treptat stimularea/extragerea până ajungeți la nivelul corespunzător.

• Dacă nivelul de stimulare/extragere ales provoacă o senzație de disconfort sau durere, este indicat să-l reduceți adecvat prin apăsarea butonului „-” (18).

• Este posibilă alternarea extragerii laptelui din ambii sâni.

• Pentru a opri pompa de sân, apăsați butonul de pornire/oprire (15).

ATENȚIE: După 30 de minute de utilizare, produsul se oprește automat din motive de siguranță.

În cazul unei baterii descărcate, indicatorul LED (14) începe să clipească în alb în timpul modului de extracție, în albastru în timpul modului de stimulare: în acest caz, este indicat să reîncărcați bateria și eventual să folosiți produsul în modul de reîncărcare. În caz contrar, produsul se oprește automat după câteva minute.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Pentru reîncărcare, conectați corpul motorului (13) la computer prin cablul USB. Pentru a reduce timpul de reîncărcare, este indicat să reîncărcați produsul când este oprit.

În timpul reîncărcării cu cablul USB introdus și produsul oprit, starea de încărcare a bateriei este indicată de indicatorul LED (14) alb continuu, starea de încărcare completă este indicată de indicatorul LED (14) albastru continuu.

Când utilizați produsul în modul de încărcare a bateriei, nu este posibil să vedeți starea de încărcare a produsului.

• **ATENȚIE:** după fiecare utilizare, curățați cu atenție toate componentele * așa cum este indicat în paragraful „CURĂȚARE”.

• Pentru a oferi imediat laptele copilului, scoateți biberonul de pe corpul pompei (4) deșurubându-l. Înșurubați inelul cu tetina (7) (inclusă în ambalaj) pe biberon. Veți obține astfel un biberon foarte practic (NaturalFeeling) gata de utilizare. • Prin închiderea cu capacul său practic impermeabil (8) (inclus în ambalaj), puteți păstra laptele extras la frigider până la 48 de ore la o temperatură de 4°C, sau în congelator până la 'la maxim 3 luni la o temperatură de -18°C. • **ATENȚIE:** Când pompa de sân nu este utilizată, deconectați întotdeauna, dacă este conectată, cablul USB de la corpul motorului și de la PC. * Cu excepția corpului motorului (13), a cablului USB (9,10) și a tubului din silicon (19). **CURĂȚARE** • Înainte de a efectua orice operațiune de curățare, deconectați, dacă este conectat, cablul USB de la PC și conectorul cablului USB (9) de la intrarea cablului USB (12) de pe corpul motorului.

• Separați toate componentele pompei de sân.

Notă: scoateți supapa (5) situată pe conducta circulară din interiorul corpului cupei (4), trăgând ușor de urechea situată pe partea laterală a supapei.

• **ATENȚIE:** scoateți întotdeauna cu grijă supapa și nu folosiți niciun instrument pentru a o curăța, deoarece s-ar putea deteriora și poate face pompa de sân inutilizabilă.

Notă: pentru a îndepărta tubul mic din silicon, mai întâi detașați diafragma (1) și capacul diafragmei de corpul pompei pentru a evita curgerea. Prin urmare, prindeți-l la capătul agățat de capacul membranei trăgând ușor.

• Spălați bine toate componentele * cu apă fierbinte și detergent de vase, clătiți bine și uscați bine cu o laveta moale și curată.

PROBLEME	CAUZE	SOLUTII
Pompa nu aspira sau aspira prea puțin	Clapeta neasamblata sau montata gresit	Asamblati clapeta corect
	Cupa si motor montate gresit	Verificati ca ati efectuat corect procedura descrisa la paragraful "pregatire". asigurați-va ca tubul din silicon este corect bransat si ca nu este rasucit, obturat.
	Cupa nu adera corect la san	Lipiti complet cupa de san si asigurați-va ca este cintrata corect. Probatii cu si fara dublura din silicon.
	Selectarea nivelului de aspiratie nepotrivit	Setati nivelul de aspiratie care vi se potrivește, astfel incat aspiratia si stimularea lactatiei sa se efectueze confortabil, apasand butoanele +/-
	Baterie descarcata	Incarcati bateria corect.
Asiratia laptelui este dureroasa	Nivel de aspiratie prea mare!	Setati nivelul de aspiratie care vi se potrivește, astfel incat aspiratia si stimularea lactatiei sa se efectueze confortabil, apasand butoanele +/-
Pompa nu porneste	Cablu usb/aparat/port usb al pc defectuos/gresit conectat	Verificati alimentarea cu electricitate

	Bransare gresita	Verificati corectitudinea bransamentelor
	Baterie descarcata	Incarcati bateria

SPECIFICATII TEHNICE - 00009199500000 POMPA ELECTRICA DE SAN PORTATA Mod. N0002 - Valoarea maximă a vidului în regim de tiraj: $-0,35 \pm 0,03$ bar ** (** valori măsurate cu cilindrul de prelevare). - Tensiune de intrare: 5V 2A - Baterie reîncărcabilă cu litiu 3.7V, 1100mAh - Durata de viata utila a dispozitivului: 500 ore - Timp maxim de funcționare autorizat: 90 minute - Tip dispozitiv: funcționare intermitentă; 30 minute ON -30 minute OFF - Fabricate în China Termeni de utilizare : - Temperatura de functionare: $+ 5^{\circ}\text{C} \div + 40^{\circ}\text{C}$

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE Aparatul marca Chicco Pompa electrica portabila pentru san 000091995000000 Mod. N0002 îndeplinește cerințele prevederi esențiale și alte relevante stabilite prin directivele 2014/30/UE (compatibilitate electromagnetica), 2014/35 / UE (joasă tensiune) și 2011/65 / UE (RoHS). O copie a declarației CE poate fi solicitată de la producător: Artsana S.p.A via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (Como) Italia.



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate. Simbolul cu pubele tăiată indică faptul că produsul face obiectul Directivei 2012/19/EC și trebuie colectat separat de deșeurile menajere. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății umane. Produsul dumneavoastră conține baterii care intră sub incidența obligațiilor de colectare selectivă aplicabile prin Directiva Europeană 2006/66/EC și care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer, ci trebuie predate spre reciclare la punctele de colectare. În calitate de utilizator final al produsului dumneavoastră, aveți obligația de a participa în procesele de reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice prin colectarea selectivă a acestora și predarea către sistemele de colectare organizate. Pentru informații detaliate despre programele de colectare și reciclare disponibile, vă rugăm să contactați biroul local, magazinul de unde ați achiziționat produsul sau rețelele de vânzare cu amănuntul.

GARANȚIE

Produsul este garantat împotriva neconformității în condiții normale de utilizare conform indicațiilor prevăzute în instrucțiunile de utilizare. Prin urmare, garanția nu se va aplica în cazul unor daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare, uzură sau evenimente accidentale. Pe durata garanției asupra defectelor de conformitate ne referim la prevederile specifice standardelor naționale.

Producator: Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 12070 Grandate (Como) - Italy

Importator si distribuitor: Paralela 45 KIDS s.r.l.; Bucuresti, sector 1, Calea Grivitei, nr.202B, tel:/fax: 021/231.06.26