



SEMI-MASCA DE PROTECTIE TIP FFP



Important!

Înainte de utilizare, citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
Păstrați aceste instrucțiuni pentru referință.
Consultați informațiile furnizate de producător.

Descriere

Semi-masca se utilizează la nevoie atunci când se dorește protecție sporită împotriva :

- contactului feței cu mâinile murdare
- inhalării directe a diverselor particule din aer

Materialele filtrante permit o respirație fără efort și constituie o barieră eficientă de filtrare.

Semi-mastile sunt de unică folosință.

Semi-mastile de protecție respiratorie sunt echipamente de protecție împotriva particulelor și aerosolilor de dimensiuni foarte mici, chiar de ordin submicronic. Sunt destinate să asigure o etanșeitate adecvată față de atmosfera ambiantă la nivelul feței purtătorului, atunci când pielea acestuia este uscată sau umedă și când acesta mișcă capul. În România și în Europa, acest tip de masti sunt reglementate de Standardul european EN 149:2001+A1:2009.

Din punct de vedere al testelor Semi-mastile de protecție civilă sunt supuse la cele mai multe teste (peste 15 la număr) dintre care cele mai importante fiind bineînțeles cele de eficiență la filtrare. Dacă la mastile faciale de uz civil se testează eficiența de filtrare la particule cu dimensiuni de 3 micrometri, la mastile de uz medical se testează eficiența la filtrare la bacteria *Staphylococcus aureus*, la Semi-mastile de protecție respiratorie, eficiența la filtrare se testează pentru particule/aerosoli începând cu dimensiuni de 0,3 micrometri.

In functie de rezultatul testelor, si conform standardului, Semi- mastile faciale se impart dupa cum urmeaza:

- FFP 1 – eficienta filtrare > 80%
- FFP 2 – eficienta filtrare > 94%
- FFP 3 – eficienta filtrare > 99%

Testele de PFE (Particle filtration efficiency) sunt realizate conform Standard European EN 149:2001+A1:2009 de catre Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie.

Straturile filtrante sunt realizate din polipropilene netesuta, aceste straturi nu irita pielea si nu sunt toxice.

Mod de livrare

Mastile sunt ambalate individual, apoi se ambaleaza cate 5 sau cate 10 bucăți într-o cutie. Ulterior se ambaleaza dupa cum urmeaza:

- 32 de cutii a cate 10 semi-masti sunt ambalate intr-o cutie mai mare iar 16 astfel de cutii sunt ambalate pe palet, in total 5120 buc semi-masti.
- 48 de cutii a cate 5 semi-masti sunt ambalate intr-o cutie mai mare iar 16 astfel de cutii sunt ambalate pe palet, in total 3840 buc semi-masti.

Specificație

Din gama Valrom Industrie de semi-masti faciale de uz civil, conforme cu EN 149:2001+A1:2009, se poate alege dintre:

- SANI01310100010 - SEMI-MASCA PROT RESP FFP1 P23 SET 10BUC
- SANI01310200010 - SEMI-MASCA PROT RESP FFP2 P22 SET 10BUC
- SANI01310200005 - SEMI-MASCA PROT RESP FFP2 P22 SET 5BUC
- SANI01310300010 - SEMI-MASCA PROT RESP FFP3 P25 SET 10BUC

Pe semi-mastile faciale de uz civil conforme cu EN 149:2001+A1:2009, produse de Valrom Industrie veti gasi inscriptionat:



VALROM INDUSTRIE - NUME PRODUCATOR
P22,23,25 - COD MATERIAL (in functie de ce materiale au fost folosite la productia mastilor);
EN149:2001+A1:2009 - STANDARDELE APLICATE:
FFP1/ FFP2/FFP3 - TIPUL SEMI-MASTII IN FUNCTIE DE GRADUL DE FILTRARE
NR - NEREUTILIZABILA (NR)

Nu se recomanda folosirea in situatiile urmatoare

- Nu folosiți pentru protectia impotriva gazelor și vaporilor, vapori de la uleiuri sau praf de la sablare.
- Nu utilizați într-o atmosferă cu mai puțin de 19,5% oxigen.
- Nu folosiți în prezența flăcărilor deschise.

Limitări și avertismente

- Asigurați-vă întotdeauna că produsul este:
 - potrivit pentru aplicație;
 - purtat corect;
 - purtat pe toată perioada de expunere;
- Produsul nu este rezistent la flacără și nu trebuie utilizat în prezența flăcărilor deschise.
- Nu folosiți mai mult de 3-4 ore sau dacă masca s-a umezit.
- Nu alterați, nu modificați sau reparați produsul în niciun fel.
- Acest produs nu conține latex și componente din cauciuc natural.
- Acordați atenție sporită atunci când produsul se utilizează pentru activități sportive.

Condiții de depozitare și valabilitate

Produsul trebuie depozitat într-un loc uscat și curat și păstrat la o temperatură cuprinsă între -20 ° C și + 50 ° C cu un raport de umiditate maxim <80%. Depozitați și mențineți produsul în ambalajul original.

Valabilitate 2 ani.



Interval de temperatură: -20 ° C + 50 ° C.




Umiditate maximă: <80%.



Perioada de depozitare a produsului este de 2 ani de la data fabricării.

Recomandari de utilizare

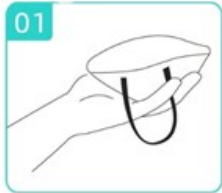

01 Deschideți semi-masca cu fața în jos fără să acoperiți partea de sus a semi-măștii

02 Poziționați semi-masca astfel încât să acoperiți bărbia și nasul



03 În timp ce ții semi-masca în poziția corectă, trage după ureche capetele de bandă

04 Folosește ambele mâini pentru a modela partea de sus a semi-măștii sa se potrivească perfect pe nasul tău



05 Asigură-te că porți corect semi-masca: respiră adânc; aerul nu ar trebui să intre prin niciun capăt al semi-măștii

Îndepărtarea și eliminarea produsului

Cu o mână apucați agățătorilor de ureche și așezați-le în față, în timp ce cu cealaltă mână apucați masca și apoi țineți-o departe de față. Scoateți masca și spălați-vă bine mâinile.

Vă rugăm să rețineți: toate dispozitivele de unică folosință trebuie aruncate conform prescripțiilor sistemului local de gestionare a deșeurilor.